

Wichtige Verwendungshinweise für ROLKO LED-Skaterräder

- » Entfernen Sie niemals die Kugellager mit Gewalt, dadurch könnte der Magnetring, welcher sich zwischen den Kugellagern befindet, beschädigt werden oder brechen. Benutzen Sie niemals einen Hammer um neue Kugellager einzubauen. Stattdessen benutzen Sie bitte eine Kugellagerpresse oder montieren Sie die Kugellager und das Rad an der Radachse zusammen. Ziehen Sie das Rad vorsichtig fest, bis es zu leuchten beginnt.
- » Sollte das Rad nicht mehr leuchten, überprüfen Sie, ob das Rad fest in der Lenkgabel eingespannt ist. Ziehen Sie die Achsschraube ggf. nach bis das Rad wieder leuchtet.
- » Bitte verwenden Sie nur beidseitig abgedichtete Kugellager. Nicht abgedichtete Kugellager können Reibungsschäden zwischen Kugellager und Magnetring verursachen.
- » Verwenden Sie bei der Montage kein Fett oder Öl, dadurch könnte der Generator zerstört oder die Leuchtfähigkeit reduziert werden.
- » Die Leuchträger sind nicht für einen aggressiven Fahrstil, sondern nur für eine entspannte Fahrweise geeignet.
- » Wir können keine Haftung für Verletzungen und Beschädigungen übernehmen, die auf missbräuchliche oder falsche Anwendung der Leuchträder zurückzuführen sind. Die Lebensdauer der Reifen hängt unter anderem von dem Straßenzustand, der Fahrweise und dem Gewicht des Fahrers ab. Abnutzung und Verschleiß sind von der Gewährleistung ausgenommen.
- » Die Leuchträder sind auf die Nutzung bei Inlineskates und Scooterrollern ausgelegt. Durch die dauerhafte Nutzung der Leuchträder am Rollstuhl sind diese größeren Belastungen wie z. B. schlechten Straßen, Nässe, Schmutz usw. ausgesetzt; dies wirkt sich nachteilig auf die Lebensdauer aus.

