



## Schlauchhaltearm



### Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| 01. Zweckbestimmung, Einsatzbereich ..... | 2 |
| 02. Kontraindikation .....                | 2 |
| 03. Sicherheitshinweise .....             | 2 |
| 04. Reinigung und Desinfektion .....      | 2 |
| 05. Wartung.....                          | 3 |
| 06. Montage / Bedienung.....              | 3 |
| 07. Technische Daten .....                | 3 |

Sehr geehrter Kunde,

das Rolko-Team dankt Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf unseres Produktes entgegenbringen. Mit dem Erwerb von unserem Haltearm haben Sie sich für ein hochfunktionelles Produkt entschieden, das den Alltag in medizinischen Einrichtungen erleichtert. Unser Haltearm wird unter Berücksichtigung der aktuellen Normen, unter Einsatz modernster Technologien und mit der Gründlichkeit und dem Teamgeist unserer Mitarbeiter entwickelt. Wir sind sicher, durch hohen Nutzwert und solide Qualität, Pflegefachkräften und Patienten bestmöglich zu unterstützen.

## 01. Zweckbestimmung, Einsatzbereich

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Das Produkt ist ausschließlich für humanmedizinische Zwecke zu verwenden. Das Produkt darf nur von autorisiertem Fachpersonal benutzt werden. Der Haltearm dient innerhalb der medizinischen Anwendung zur Aufnahme von z.B. leichten Zubehörteilen wie Beatmungs- und ähnlichen Schläuchen, EKG-Kabeln, oder weiterer kundenspezifischer Anforderungen, die in individueller Art mittels z.B. spezieller Schlauchklemmen positioniert werden.

## 02. Kontraindikation

Haltearme sind ungeeignet für alle Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen und zu Gefahren führen können. Haltearme dürfen außerdem nicht als Haltegriff, Auflagen oder zur Abstützung von Lasten genutzt werden.

## 03. Sicherheitshinweise

- Bedienungsanleitung: Diese Bedienungsanleitung ist vor dem Gebrauch des Haltearms zu lesen und zu beachten.
- Die Gebrauchsanweisung ist bestimmt für medizinisches Personal. Der Einsatz des Gerätes ist nur Personen gestattet, die in die medizinische Anwendung eingewiesen wurden. Sie müssen zusätzlich die Gebrauchsanweisung gelesen und die Handhabung des Gerätes verstanden haben. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes und muss stets in Gerätenähe verfügbar sein.
- Durch den eigenmächtigen Einsatz von nicht Originalersatzteilen wird von Seiten des Herstellers keine Haftung oder Gewährleistung übernommen. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Hersteller bzw. hierzu autorisiertes Fachpersonal unter Verwendung von Originalteilen und unter Beachtung der für medizinische elektrische Geräte geltenden Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen werden.
- Haltearme dürfen nicht als Haltegriff, Auflagen oder zur Abstützung von Lasten genutzt werden.
- Zubehör oder Kombinationen von Zubehör dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie in der Gebrauchsanweisung angegeben sind. Anderes Zubehör, Kombinationen oder Verschleißteile nur verwenden, wenn diese ausdrücklich für die vorgesehene Anwendung bestimmt sind und Leistungsmerkmale sowie Sicherheitsanforderungen nicht beeinträchtigen.
- Beachten Sie die Angaben zur Belastbarkeit. Überschreiten Sie nie die angegebenen maximalen Werte.
- Achtung: Die Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung können nicht alle Gefahrensituationen berücksichtigen, die bei der Nutzung des Produkts auftreten können. Es ist daher wichtig, dass ein achtsamer Umgang mit dem Haltearm gewährleistet wird.

## 04. Reinigung und Desinfektion

Zur Reinigung empfiehlt sich das Abwischen mit milder Reinigungslösung, hinterher trocken wischen. Falls erforderlich kann der Haltearm durch Wischdesinfektion behandelt werden. Aufsprühen von beispielsweise „Antifect Liquid“ Fertigsprühlösung, ca. 30 min. Einwirkdauer. Beachten Sie unbedingt die Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers sowie die aktuell geltenden Hygieneregeln für das Krankenhaus.

## 05. Wartung

Das Produkt benötigt keine Wartung. Durch den Gebrauch verursachter Verschleiß sowie Alterung können die sicherheitsrelevanten Funktionen des Produkts beeinträchtigen. Vor jedem Gebrauch den Zustand des Produkts prüfen. Dabei sind insbesondere die Befestigungspunkte, mechanischen Komponenten und die Feststelleinrichtungen der Gelenke zu prüfen. Ein mangelhaftes Produkt darf nicht verwendet und nicht selbst repariert werden.


## 06. Montage / Bedienung

Vor der ersten Nutzung überprüfen Sie bitte das Produkt auf Beschädigungen, die durch den Transport entstanden sein könnten. Die Montage erfolgt z.B. mittels Halteklau an einer Geräteschiene. Achten Sie bei der Montage darauf, dass das Profil der Schienenklau fest an der Geräteschiene anliegt. Drehen Sie zum Festziehen der Schienenklau den Sterngriff im Uhrzeigersinn, bis sich die Schienenklau nicht mehr auf der Geräteschiene verschieben lässt. Arretieren Sie anschließend den ausgerichteten Haltearm durch Drehen im den ausgerichteten Haltearm durch Drehen im Uhrzeigersinn der seitlichen Feststellschraube. Die Höhenausrichtung erfolgt durch Lösen bzw. Festziehen der Klemmhebel kann deren Stellung den Gegebenheiten angepasst werden. Die Klemmhebel müssen vor Gebrauch des Haltearmes fest angezogen sein. Überprüfen Sie anschließend, dass sich der Haltearm nicht mehr selbständig lösen kann. Für andere Befestigungsarten gilt jeweilig die spezifische Anforderung an eine sachgerechte Arretierung in Anlehnung an beschriebene Vorgehensweise zur Halteklauen für eine Geräteschiene.

## 07. Technische Daten

Liefereinheit: 1 Stück  
 Artikelnr.: MT-EK-PR  
 Max. Temperatur: Lagerung: -20°C bis 60°C, Betrieb: 0°C bis 40°C  
 Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 0-90 %, Betrieb: 30-75%  
 Klassifizierung : Klasse I, nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG  
 UMDNS-Code: 11-835

|                         |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Länge (m)               | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1   | 1,2 |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | 2   | 1   | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

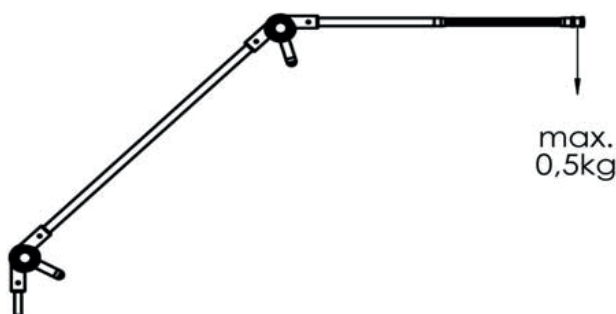

Das max. Gewicht an der Flexwelle beträgt 0,5 kg. Die Flexwelle darf bis zu einem Winkel von max. 90° gebogen werden, andernfalls können irreparable Beschädigungen auftreten.

**Gebrauchsanweisung: Haltearm - MT-EK-PR / Stand 2020-02-04 / Rev. 02**



© Rolko Kohlgrüber GmbH, Industriestr. 14 - 16, 33829 Borgholzhausen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers.

Alle Rechte vorbehalten. Das gelieferte Produkt kann von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen.

Alle technischen Daten sind Nenndaten und unterliegen konstruktions- und herstellungsbedingten Toleranzen.

# Schlauchhaltearm

Artikelnr.: MT-EK-PR

